

カットバン®

救急絆創膏 34864000
一般医療機器 再使用禁止
届出番号 41B2X00001000011

【使用目的又は効果】 創傷面の保護

【使用方法等】 患部を清潔にして、パッドが患部にあたるように貼ってください。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

2.その他の注意

- 1)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、貼り替えてください。
- 2)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
- 3)粘着面を患部に貼らないでください。

【保管方法】

- 1.直射日光を避け、涼しい所に保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。

【包装】

- (S) 12mm×52mm(パッド7.5mm×17mm) 12枚
(M) 19mm×72mm(パッド11mm×24mm) 56枚
(L) 25mm×72mm(パッド17mm×24mm) 12枚

3サイズ 80枚入

添付文書が必要な方はお申し出ください。

製造販売元



祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1

[お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

日本製

